

CARA MENGGUNAKAN PROGRAM TES BUTA WARNA

1. Klik Registrasi Baru pada menu pasien, tekan bulatan hijau untuk melakukan penambahan pasien kemudian isikan data pasien dan selanjutnya tekan gambar disket / save untuk melakukan penyimpanan. Tekan tombol exit untuk keluar dari pengisian data pasien.
2. Setelah melakukan registrasi, klik Konsultasi untuk melakukan tes. Masukkan nomor pasien untuk memulai tes
misal: 00001
3. Isikan jawaban pada kotak merah kemudian tekan Enter. Setelah selesai melakukan tes, tekan kotak biru / report untuk melihat hasil tes.
4. Untuk mengetahui hasil tes, tekan Hasil Konsultasi kemudian klik pada nomor pasien kemudian tekan cetak untuk menampilkan hasilnya.

MENAMBAHKAN GAMBAR BARU

1. Tekan menu File dibagian kiri atas, pilih Login (username & password: admin)
2. Tekan Image Knowledge tekan bulatan hijau untuk menambahkan gambar kemudian masukkan gambar dan isikan value sesuai yang ada di gambar. Tekan gambar disket / save untuk menyimpan gambar. Tekan tombol exit untuk keluar.
3. Tekan Result Knowledge untuk memberikan rule atau aturan pada gambar tersebut.